

Salus Gelenk-Aktiv Wärme-Pflaster, 2St

aus der Serie Salus® Gelenk-Aktiv



Artikelnummer 01001847	GTIN-Stück  4 004 148 329760	GTIN-Verpackung  4 004 148 331459	eco-ID 176544	
----------------------------------	--	---	-------------------------	---

Marke

Salus®

Qualität

konventionell

Zollrechtliche Herkunft

Deutschland (DE)

Wechselnde Ursprungsländer

ja

Ursprungsland/ -region

Hauptzutaten

Diverse Länder

Allgemeines

Zur Schmerzlinderung bei Verspannungen und Muskelschmerzen.

Besonderheiten

wärmend, Selbst aktivierende Wärme, Entspannt verkrampfte Muskeln, Hautfreundlichkeit dermatologisch getestet,





Gelenk-Aktiv Wärme-Pflaster, 2St

aus der Serie Salus® Gelenk-Aktiv



Artikelnummer 01001847	GTIN-Stück  4 004148 329760	GTIN-Verpackung  4 004148 331459	eco-ID 176544	
----------------------------------	---	--	-------------------------	---

Hinweise zur Handhabung oder Verwendung

Medizinprodukt zur Schmerzlinderung bei Verspannungen und Muskelschmerzen.

Gebrauchsanweisung

Den betroffenen Hautbereich zunächst reinigen und abtrocknen. Nehmen Sie dann das Gelenk-Aktiv Wärme-Pflaster aus der Verpackung und entfernen Sie die Schutzfolie. Bringen Sie das Gelenk-Aktiv Wärme-Pflaster an der schmerzenden Stelle auf die Haut auf und stellen Sie sicher, dass die ganze Oberfläche auf der Haut haftet. Bei starker Körperbehaarung kann das Gelenk-Aktiv Wärme-Pflaster auch auf eng anliegender Kleidung getragen werden. Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis die gewünschte Temperatur erreicht wird. Tragen Sie das Gelenk-Aktiv Wärme-Pflaster mindestens 8 Stunden.

Wenn sie das Gelenk-Aktiv Wärme-Pflaster bei Periodenschmerzen verwenden, platzieren Sie das Pflaster auf der Unterwäsche und nicht direkt auf der Haut. Stellen Sie sicher, dass es richtig haftet.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Beenden Sie die Anwendung:

- bei Unwohlsein, Hautreizungen, übermäßigem Wärmeempfinden, einem brennenden Gefühl, Anschwellung, Rötung oder irgendeiner anderen anhaltenden Hautveränderung im Bereich des angebrachten Pflasters
- falls keine Besserung der Beschwerden eintritt, wegen der das Wärmepflaster angewendet wird

Wenden Sie das Wärmepflaster nicht an:

- bei gleichzeitiger Anwendung anderer wärmender Produkte, Cremes oder Farbpigmenten
- bei Hautverletzungen
- bei Blutergüssen oder Schwellungen, die in den letzten 48 Stunden aufgetreten sind
- bei Personen, die nicht selbständig das Pflaster entfernen können (v.a. Kinder und ältere Personen)
- falls Sie Magnetstrahlung (Kernspinnresonanz) ausgesetzt sind
- bei Beschädigung des Pflasters und Austritt der Substanzen aus den Wärmekammern

Wichtige Hinweise:

Fragen Sie bitte vor Anwendung des Gelenk-Aktiv Wärme-Pflasters ihren Arzt, falls Sie schwanger sind oder Kreislaufprobleme, Herzbeschwerden, rheumatoide Arthritis oder Diabetes haben. Im Falle von direktem Kontakt des Füllmaterials mit der Haut oder den Augen, Haut und Auge mit reichlich Wasser auswaschen und unverzüglich ärztlichen Rat einholen. Sie sollten auch im Falle von versehentlichem Verschlucken ärztlichen Rat einholen.

Die Hautbereiche, auf denen das Gelenk-Aktiv Wärme-Pflaster aufliegt sollen regelmäßig auf Irritationen überprüft werden. Das Gelenk-Aktiv Wärme-Pflaster nicht in hitzeunempfindlichen Körperbereichen oder unter enger Kleidung bzw. Gürteln anwenden. Die Gelenk-Aktiv Wärme-Pflaster innerhalb von 24 Stunden nicht länger als 8 Stunden anwenden. Bei Patienten über 55 Jahren steigt das Verbrennungsrisiko. In diesem Fall wird empfohlen das Produkt auf der Kleidung und nicht während des Schlafens anzuwenden. Um Verbrennungen zu vermeiden, achten Sie bei der Anwendung am Handgelenk darauf, dass die Wärmeelemente nicht überlappen.

Es ist untersagt, das Medizinprodukt auf irgendeine Art zu erhitzen.

Lager- und Aufbewahrungshinweis

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren., Trocken aufbewahren., Von Sonnenlicht fernhalten.

Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung

Den betroffenen Hautbereich zunächst reinigen und abtrocknen. Nehmen Sie dann das Gelenk-Aktiv Wärme-Pflaster aus der Verpackung und entfernen Sie die Schutzfolie. Bringen Sie das Gelenk-Aktiv Wärme-Pflaster an der schmerzenden Stelle auf die Haut auf und stellen Sie sicher, dass die ganze Oberfläche auf der Haut haftet. Bei starker Körperbehaarung kann das Gelenk-Aktiv Wärme-Pflaster auch auf eng anliegender Kleidung getragen werden. Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis die gewünschte Temperatur erreicht wird. Tragen Sie das Gelenk-Aktiv Wärme-Pflaster mindestens 8 Stunden.

Wenn sie das Gelenk-Aktiv Wärme-Pflaster bei Periodenschmerzen verwenden, platzieren Sie das Pflaster auf der Unterwäsche und nicht direkt auf der Haut. Stellen Sie sicher, dass es richtig haftet.



Gelenk-Aktiv Wärme-Pflaster, 2St

aus der Serie Salus® Gelenk-Aktiv



Artikelnummer 01001847	GTIN-Stück  4 004 148 329760	GTIN-Verpackung  4 004 148 331459	eco-ID 176544	
----------------------------------	--	---	-------------------------	---

Inhaltsstoffe, Zusammensetzung

Es enthält spezielle Wärmeelemente aus natürlichen Materialien wie Eisenpulver, Kohle und Salz, die Wärme produzieren sobald sie mit Luftsauerstoff in Kontakt kommen.

Weitere Eigenschaften

alkoholfrei ✓



Gelenk-Aktiv Wärme-Pflaster, 2St

aus der Serie Salus® Gelenk-Aktiv



Artikelnummer 01001847	GTIN-Stück 4 004148 329760	GTIN-Verpackung 4 004148 331459	eco-ID 176544	
----------------------------------	--	---	-------------------------	--

Warengruppenspezifische Angaben

Rechtlicher Status..... Medizinprodukt
Süßung..... nicht gesüßt

Qualität

Welcher Standard wird erfüllt..... konventionell

Gesetzliche Angaben

Pharmazeutischer Unternehmer..... SALUS Haus Dr.med. Otto Greither Nachf. , Bahnhofstr. 24, D-83052 Bruckmühl

Hinweise zu Gesundheitsprodukten

Angaben zur VE (VerbrauchsEinheit / Einzel)

Verpackungsart..... Faltschachtel
Verpackungsmaterial..... Pappe
Stücke in Packung..... 2
Einheit der Einzelstücke..... Stück
Bezeichnung der Einzelstücke..... Stück

Preise und Konditionen

Pfand..... nein

Sonstiges

PZN..... 13501318